


ICTニュース8月号

院内感染対策委員会8月

尿道留置カテーテルの正しい使用方法確認です。メーカーによって使用方法が若干違います。製品を正しく理解しなければ、破損や感染の原因となります。正しく使用しましょう。

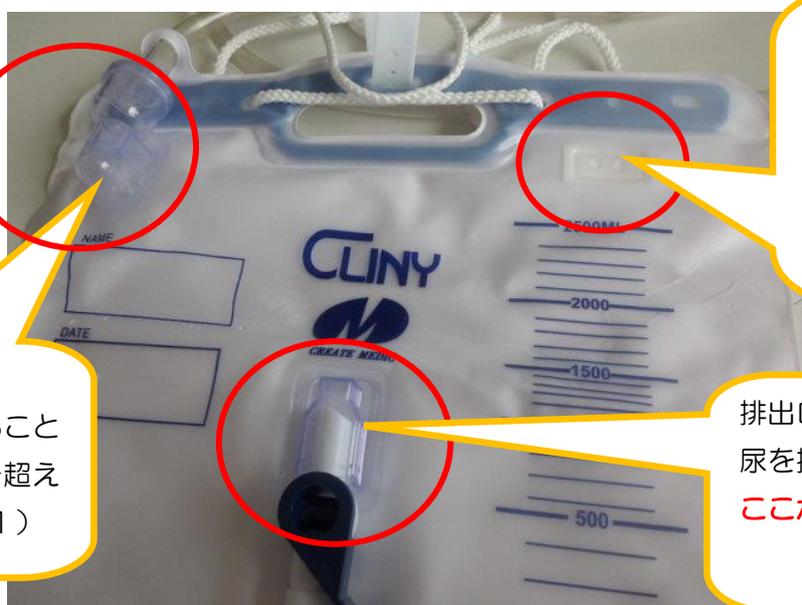

空気口


匂いが漏れないようになっています。フィルターになっているので、尿などで濡れるとフィルター機能がなくなります

逆止弁

尿が、膀胱内に逆流することを防ぐ。しかし一定量を超えると逆流する。(500ml)

排出口

尿を排出し廃棄する場所
ここから、尿採取はしない

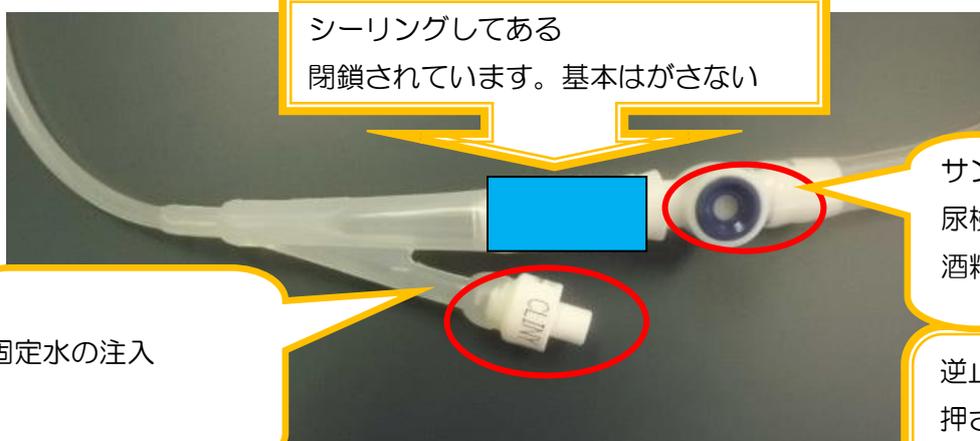

シーリングしてある
閉鎖されています。基本はがさない

固定水の注入

サンプルポート

尿検体の採取のみ
酒精綿で消毒してから採取

逆止弁が付いているので、
押さない。
他の用途に使用しない