

# 3月医療安全ニュース

2021年3月26日 あおもり協立病院 医療安全管理室

いつもインシデント入力して頂き有難うございます。

今回はお知らせです。


## 「動脈血 採血キット変更」

現在使用している動脈血採血キット（血ガスキット）にリコールがかかりました。詳細として封が開いている状態での出荷されていたようです。これに伴い、販売会社はすべての対象商品を回収することにしました。当院で使用している動脈血採血キットも該当しており、昨日時点（3月25日）で全て回収しております。代替商品をすべての部署に入れ替えをしておりますが既存のものと若干変更がありますのでお知らせいたします。

既存のもの



変更後のもの

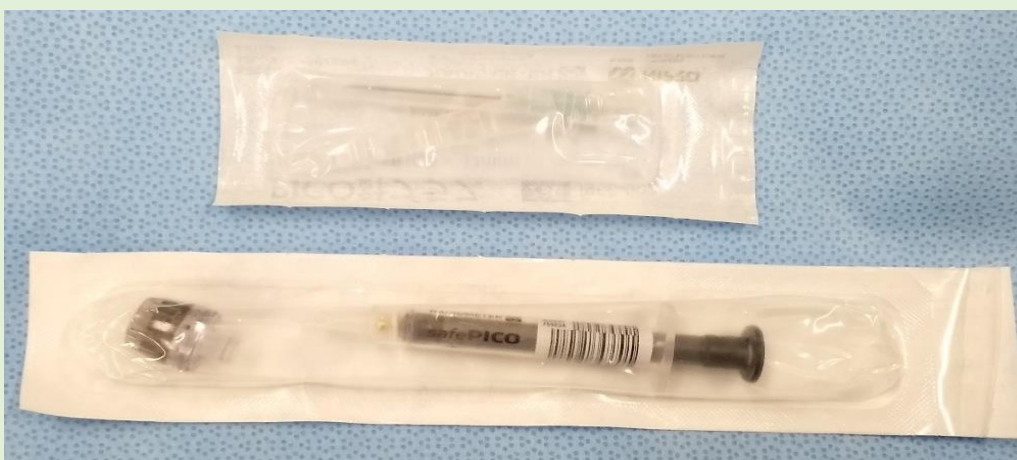


\* 変更後のものは針とシリンジが個包装となっております。

使用方法は次のページで紹介いたします。

## 使用方法

①個包装から取り出し清潔操作で針とシリンジを付けます。

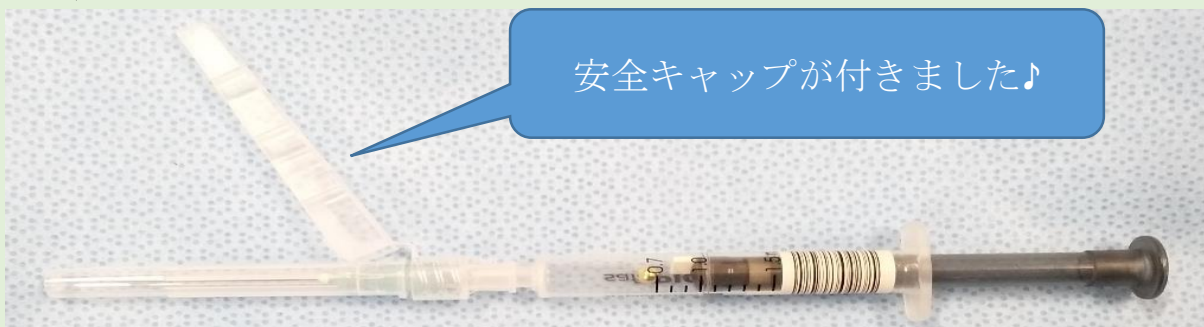

②採血後は安全キャップを閉めます（医師が操作します）



③針の根元を付属のキットに付け替え、エアーを抜き検査室に提出します。



まとめ！ 動脈血採血キットが変更になったことで・・・

- ・ 針とシリンジが個包装になった。
- ・ 安全キャップが付いた。
- ・ 付属キットが変更となった。

ご周知の程宜しくお願い致します。

なお、正しく検査するためには **1ml** の血液が必要となります。

既存のものとの  
の違い！

