

7月医療安全管理室ニュース

2025年7月30日 あおもり協立病院 医療安全管理室

いつもインシデント入力して頂き有難うございます。


**輸液ポンプ・シリンジポンプを使用する際は、
輸液ルートやシリンジは適正か
ご確認をお願いします。**

輸液ポンプやシリンジポンプを使用する際に、間違ったルートやシリンジを使用し正確に輸液できなかった事例が発生しております。

院内用シリンジポンプ、在宅用小型シリンジポンプともに使用できるシリンジは**テルモ社製**です。



テルモシリンジ→使用可

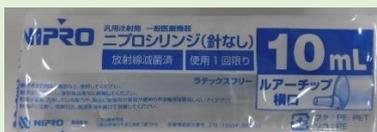

ニプロシリンジ→使用不可



その他シリンジ→使用不可


例：生食注シリンジ「オーツカ」

輸液ポンプ使用時のルート間違い防止のために
 輸液ポンプのドア横部分に注意喚起シールを貼付しました。

点滴を準備した人、ポンプに繋ぐ人が異なる場合があります。
 ポンプにつなぐ前に
 今一度確認を！



輸液ポンプ 使用可

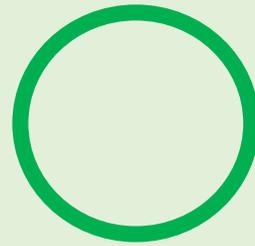

※大きくポンプ用と記載あり



輸液ポンプ 使用不可



輸液ポンプ・シリンジポンプを使用する際は

6Rの確認とともに、輸液ルートやシリンジの確認もお願いします。

不明な点はお気軽に臨床工学室へお問い合わせください。